

■仕様: キャニスター

項目	内容
一般的名称	真空吸引器
販売名	ヨックスディスポホープ S802
届出番号	10B2X00014C00013
入口吸引圧力	-53.3~-80KPa


・一般医療機器・特定保守管理医療機器

■仕様: ライナー

項目	内容	
一般的名称	吸引器用キャニスター	
販売名	ヨックスディスポホープ用ライナー	
届出番号	10B2X00014A00007	
容量	3.5L	2L
商品コード	361021(1箱40個入)	361022(1箱40個入)

・一般医療機器・再使用禁止

キャニスター&寸法

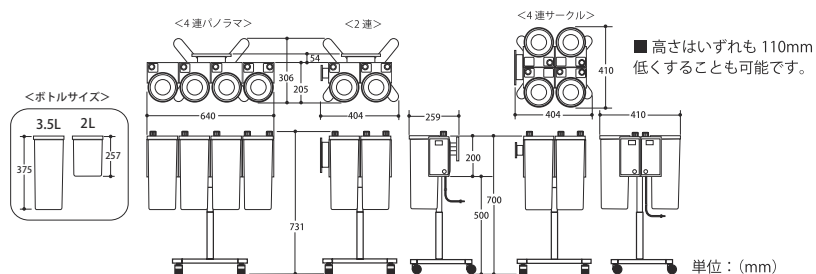

関連商品



■微量ボトル仕様

項目	内容
一般的名称	吸引器用キャニスター
販売名	微量ボトル
届出番号	10B2X00014A00004
容量	450cc

・一般医療機器・再使用禁止

■関連商品一覧

品名	入数	商品コード
微量ボトル	20個入	359058
骨片トラップ	20個入	359057
ホースコネクタ	10個入	361231
4連サークル用 連結ジョイント	12本入	361232

※上記はいずれもディスプレイ可能です。

- 製品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。
- 製品の定格及びデザインは、改善等の為予告なく変更する場合があります。

注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

■お問い合わせは

手術室用吸引器

さらに
安心して、使いやすい
ヨックスディスポホープ



簡単、安全、エコ設計のユニバーサルデザイン。

今、その能力が実感できます。

ホープの選択

現場の状況に応じて
ベストなタイプをご用意。
ホープならではの使い方。



手術室での吸引器にとって、
本当の使いやすさとは何か…。
これがホープ開発の原点です。
毎日使うものだからこそ
使い易く、安全、かんたん機構に
こだわりました。
セット、ライナー交換、廃棄と、
その能力が実感できます。

<ボトルサイズ>



3.5L 2L

4連パノラマ

一目で分かる吸引量・HOPE スタンダード



● 3.5L 商品コード：360001
● 2L 商品コード：360002

4連サークル

大容量・省スペース



● 3.5L 商品コード：360011
● 2L 商品コード：360012

2連

コンパクト・ジャストサイズ



● 3.5L 商品コード：360101
● 2L 商品コード：360102

ホープの特徴

開発のコンセプトが活かされています。

ダブル吸引コントローラー

■ 2つのバルブで吸引をコントロール



● **メインバルブ**
吸引器全体に吸引圧が作用します。
● **サブバルブ**
各ボトルに吸引圧が作用します。



使用中のライナー交換トラブル時において簡単操作で回避し、吸引手技を継続できます。

ユニバーサルライナー

■ プレ、ファイナルの区別のない薄形フィルムライナー



セット間違いや、在庫調整に困らないプレ、ファイナルの区別のないフィルムボディで、廃棄プラスチック量を35%削減しました。
(従来品 3.5L 時との重量比較)

ダブルストッパー

フィルターでストップ + プロテクターでストップ



■ 3.5L でしっかり停止。
フィルターとベント通路の作用でライナーを必要以上に満杯にしたり、排液漏れを防止します。



■ 万一、ライナーから廃液が漏れてもプロテクターが働き自動停止します。
機器や配管等の汚染防止に役立つ機能です。

ワンタッチ

凝固剤投入



■ 吸引終了後にフタを開けずに、指先で凝固剤を投入でき、排液に触れずに交換処理ができます。感染対策に大変有効です。