



大陽日酸
The Gas Professionals



タッチワンHP

酸素治療フローメータ

医療の現場にやさしいデザインをお届けします。



● 高圧ガス噴出を防止

バルブに減圧システムを搭載しました。万一、酸素がもれた場合でも、高圧の酸素が吹き出る心配がありません。

● 低流量から高流量まで対応

流量ダイヤルは大きくて操作しやすい形状にしました。0.25Lから15Lまで、15段階で広範囲かつ詳細な流量設定が可能です。

● 360度回転ホースグチ

酸素カニューラの動きに合わせてホースグチが回転することで、よじれを防止します。ストレッチャーに搭載した時も安心です。

● 見やすい残量計

立ったままでも残量が確認できるように、角度をつけて残量計を取り付けています。

● 安心・安全を考慮したボンベ元栓

一目で分かる元栓の開閉表示で、開け忘れのリスクを低減します。万一、酸素がもれた場合でも、元栓を「閉」にするだけで、速やかに酸素の流出を防ぐことが可能です。



元栓全開時

元栓全閉時



タッチワンHP

45度回転

カチッ!



ボンベ取り違い防止

タッチワンHPは、酸素ガス専用の調整器です。種類の異なるガスボンベには取り付けられないため、ボンベの取り違いが起こりません。

簡単ツイスト着脱

押し込みながら回すだけで簡単に取付け可能です。ボンベとの接続が不十分な場合は、分かりやすい赤色のエラー表示でお知らせします。

快適設計

タッチワンHPの取付け時に工具は一切不要です。面倒なバッキング交換も必要ありません。

BCP対策としても最適

タッチワンHPと同じ方法で取り付けられるアウトレットアダプタは、災害・緊急時など、院内アウトレットが使えない場面で活躍します。

アウトレットアダプタ



ストレッチャー取付け時



撮影協力: パラマウントベッド株式会社

仕様

■酸素流量調整器

品名	タッチワンHP
製造販売承認番号	22900BZX00174000
一般名称/分類	酸素治療フローメータ/管理医療機器
特定保守管理医療機器	非該当
使用ガス	酸素ガス
入口圧力	0.42MPa
流量範囲	0～15L/分
流量目盛	0/0.25/0.5/0.75/1/1.25/1.5/2/2.5/3/4/5/6/10/12/15L/分
使用温度	-10～+40℃



■酸素供給装置(オプション)

品名	アウトレットアダプタ
接続方式	1次側:ツイストジョイント方式 2次側:ピン方式(酸素ガス用)
入口圧力	0.42MPa
標準送気圧力	0.4MPa ^{※1}
最大流量	60L/分 ^{※1}
耐用期間	10年 ^{※2}
適応規格	JIS T 7101:2014 医療ガス配管設備



※1 酸素ボンベ内圧力5～14MPa時

※2 機能部品の劣化がない場合

■減圧弁部

品名	NB-4
製造届出番号	13B2X00193000008
入口圧力	3～14.7MPa
出口圧力	0.42MPa
一般名称/分類	高圧ガスレギュレータ/一般医療機器
特定保守管理医療機器	該当
耐圧試験圧力	24.5MPa
最高使用圧力	14.7MPa
安全弁作動圧力	16.7～19.6MPa(100～110℃可溶合金使用)
ガス充填口/脚ネジ	W22 山14 オス(逆止弁付)/ 3/4-16UNFネジまたはV1ネジ
残量計	0/3/5/10/15/20MPa(目安)



■重量

重量	約1.1kg (酸素流量調整器部[タッチワンHP]、減圧弁部) 約1.2kg (酸素供給装置部[アウトレットアダプタ]、減圧弁部)
----	--

関連製品

ベッド用ボンベカート (キャスター付き)

ベッドに架けるフック部分にゴムを装着。
寸法:幅240×奥行220×高さ780mm



販売代理店向け製品



ガス放出治具



充てん専用継手

•ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。•当カタログに記載の仕様は、性能向上のため予告なく変更することがあります。
•この装置は酸素吸入療法以外の目的に使用しないでください。•「タッチワン」は大陽日酸株式会社の登録商標です。

製造販売元

大陽日酸株式会社

バイオ・メディカル事業本部

東京都品川区小山1-3-26 〒142-8558
TEL.03(5788)8340 FAX.03(5788)8710

バイオ・メディカル事業部 医療機器営業課

東京都千代田区岩本町3-5-12 〒101-0032
TEL.03(5788)8670 FAX.03(5687)6630

東北支社 TEL.022(742)4770

関西支社 TEL.06(6449)7080

北関東支社 TEL.048(646)0061

中四国支社 TEL.082(241)8691

関東支社 TEL.044(549)9300

九州支社 TEL.092(482)0681

中部支社 TEL.052(533)8120



JQA-MD0100 JQA-QMA15307

お問い合わせは

■製造元

株式会社 ネリキ